

ACCU-CHEK® LinkAssist








Novinka

Novinkou je automatický zaváděcí nástroj Accu-Chek® LinkAssist pro snadné, rychlé a téměř bezbolestné zavedení kanyly do podkoží.

Jednoduchá manuální či automatická aplikace

- Nyní máte možnost výběru mezi ručním a automatickým zavedením setu do podkoží, obě možnosti jsou bezpečné a snadné.
- Automatický zavaděč Accu-Chek® LinkAssist pomůže set zavést rychle, přesně a téměř bezpolestně.
- Snímatelný modrý kryt držáku nabízí přesnou a zároveň jemnou manipulaci při manuálním zavádění. Jistí polohu ocelové zaváděcí jehly, která se po zavedení kanyly odstraní a zlikviduje stejně jako ochranná krytka kanyly a modrý kryt držáku.
- Díky otevřenému designu vidíte místo vpichu a můžete se proto vyvarovat zavedení do jizvy nebo případnému uvíznutí náplasti v zaváděcím přístroji.
- Automatický bezpečnostní zámek zabrání nechtěné aktivaci přístroje během přípravy.
- Jedním prstem můžete jednoduše a bezpečně aktivovat spouštěcí tlačítko.



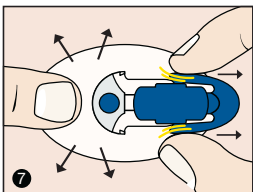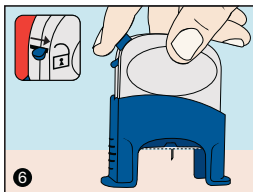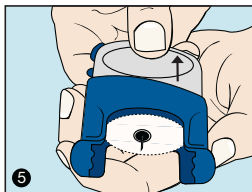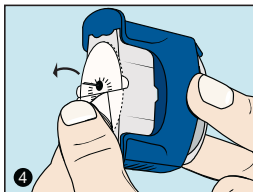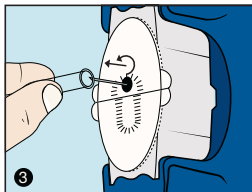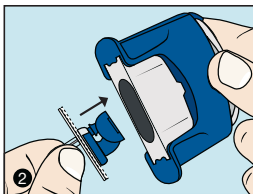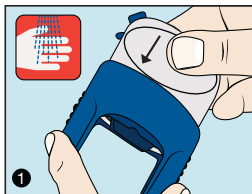

Použití nástroje Accu-Chek® LinkAssist pro zavedení infuzního setu Accu-Chek® FlexLink

Krok 1: Zatlačte napínací část zaváděcí pomůcky směrem k základně nástroje.

Krok 2: Hlavici infuzního setu uchopte palcem a ukazováčkem za ochranný kryt jehly tak, aby modrý kryt držáku směřoval nahoru. Zasuňte hlavici do otvoru zaváděče k úplnému zajištění.

Krok 3: Odstraňte průhledný ochranný kryt jehly.

Krok 4: Odstraňte obě části samolepicího krycího materiálu.

Krok 5: Jednou rukou pevně uchopte zaváděč a druhou rukou vysouvejte napínací část směrem nahoru tak daleko, jak to bude možné. Zaváděcí nástroj je nyní napnutý. V tomto kroku je zajištěna bezpečnostní pojistka.

Krok 6: Aktivujte zaváděč posunutím bezpečnostní pojistky ze „zajištěné“ polohy. Stiskněte tlačítko pro uvolnění setu a zaveďte tak kanylu do podkoží.

Krok 7: Odstraňte a zlikvidujte modrý kryt držáku a ocelovou zaváděcí jehlu.